

raeda



Pás na nohu


Návod k použití




Návod k použití tašky a pásu na nohu

i Tašku na nohu umísťujete zipem k sobě. Příklad na pravou nohu (na levou nohu postupujte obráceně).


1. Připravte si pás na nohu pro provlečení taškou ve znázorněné poloze.

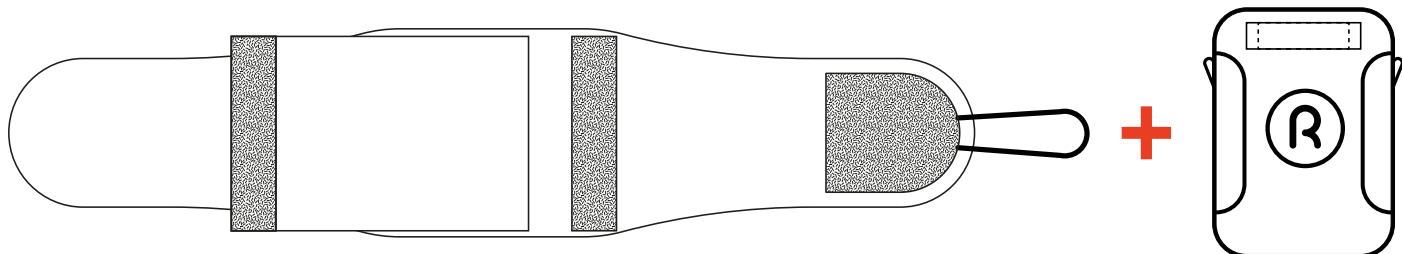


2. Uchopte pás za gumičku a protáhněte prostorem pod přední stěnou tašky.

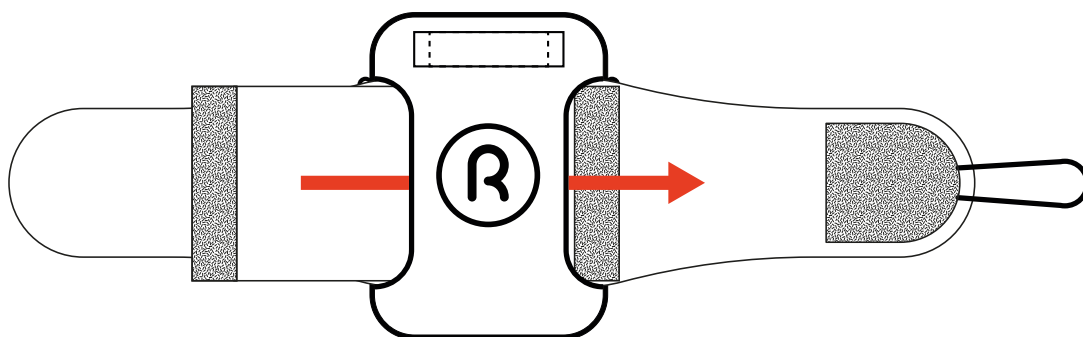

3. Kratší část pásu (zajišťovací chlopeň) na nohu přehněte přes přední stěnu tašky a pomocí suchého zipu na druhé straně zafixujte.

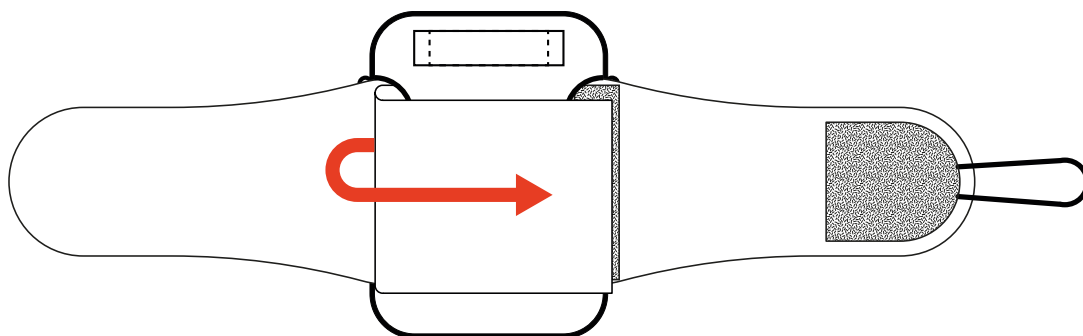

4. Nyní můžete pás s taškou obtočit kolem nohy a pomocí suchého zipu zafixovat.

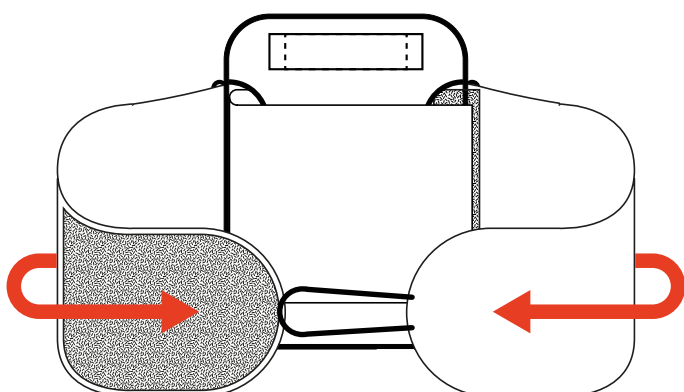

5. Zajištění pásu proti povolení suchého zipu. Gumičku s brzdičkou protáhneme kratší gumičkou, stáhneme a brzdičkou zaaretujeme.

