

raeda



# XL pás přes nohy


Návod k použití




# Návod k použití pásu přes nohy s taškou

## A) Postup navlečení tašky na pás a následná fixace nohou.


1. Připravte si pás na nohy a tašku pro provlečení ve znázorněné poloze.

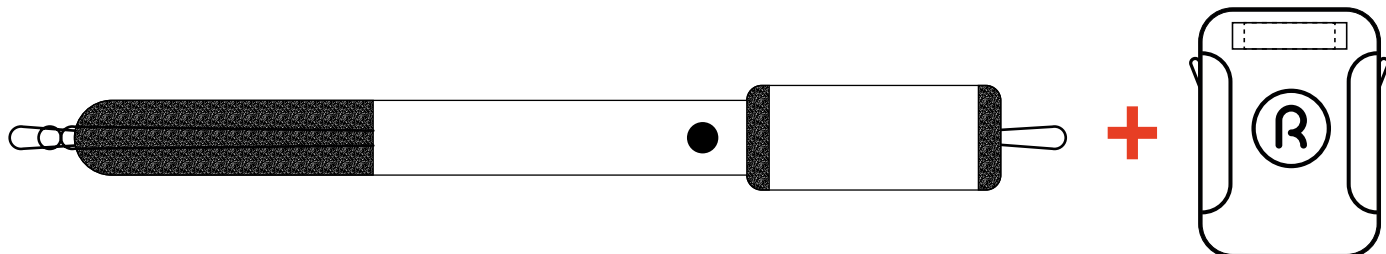

2. Pás provlečeme taškou pomocí gumiček.


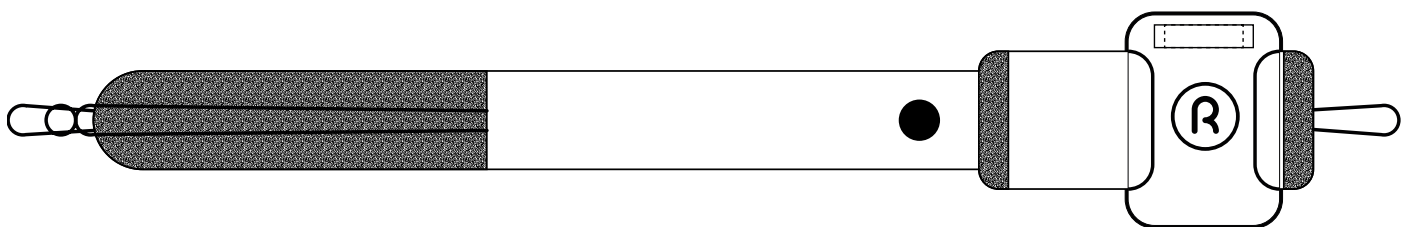


3. Tašku s pásem otočíme a spojíme pomocí suchého zipu a nakonec zafixujeme za knoflík pomocí gumičky.

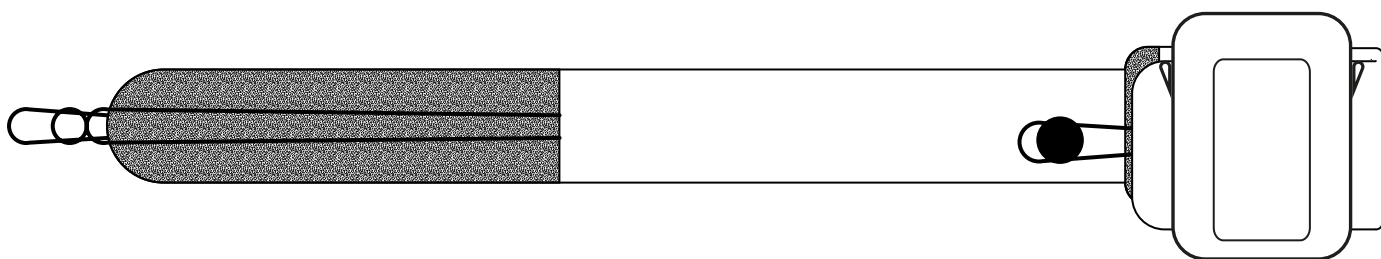


4. Tašku si položíme na klín, pás protáhneme pod nohy, zasuneme pod tašku a pomocí suchého zipu spojíme.

5. Na pravé straně provlékneme gumičku s brzdou gumičkou bez brzdy, následně utáhneme a zaaretujeme proti nechtěnému uvolnění.

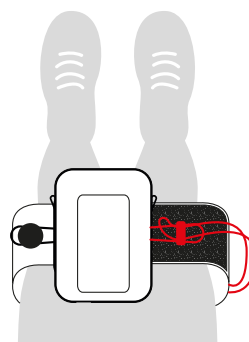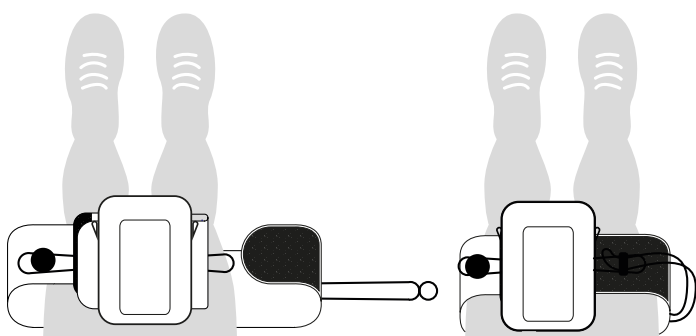


## B) Postup fixace nohou pásem a následném navlečení tašky.


1. Připravte si pás na nohy pro provlečení pod nohy ve znázorněné poloze.

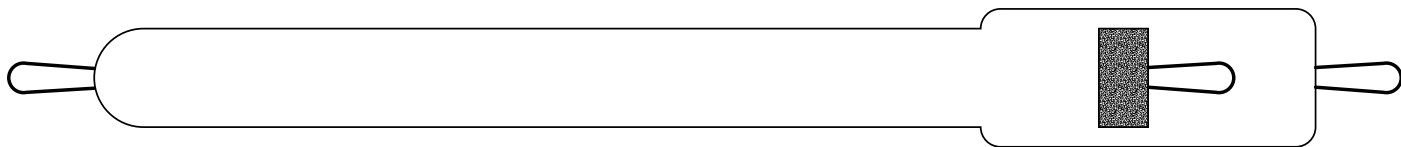


2. Pás provlečeme pod nohy pomocí gumiček.

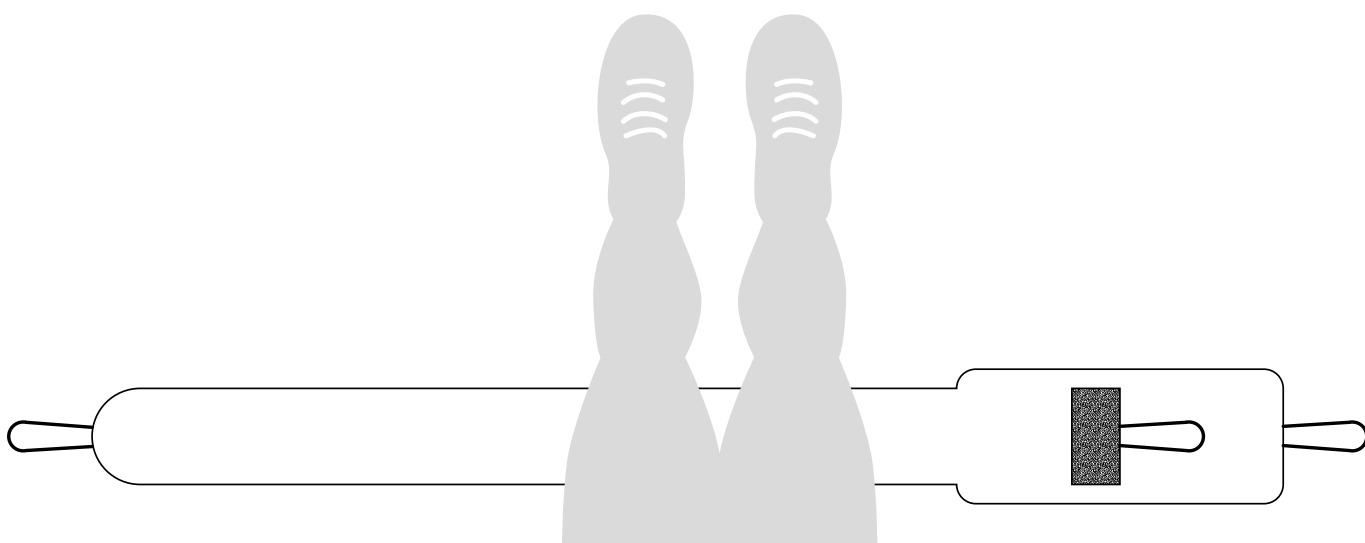


3. Pás omotáme kolem nohou pomocí gumiček a spojíme suchým zipem.

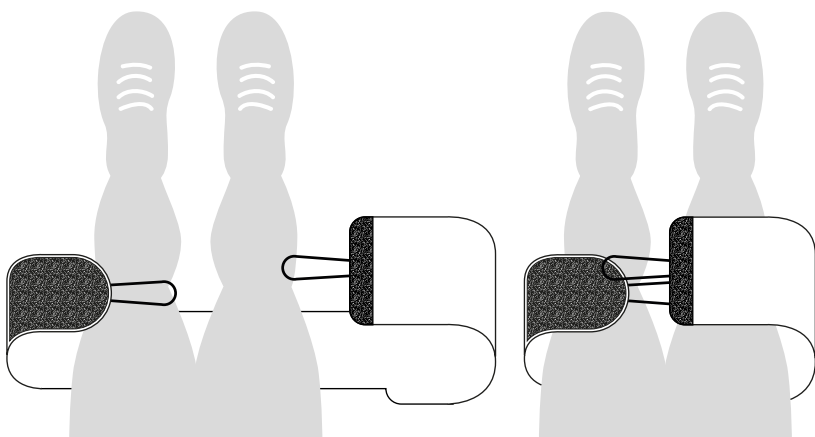


4. Na levé straně provlékneme gumičku s brzdou gumičkou bez brzdy, následně utáhneme a zaaretujeme proti nechtěnému uvolnění.

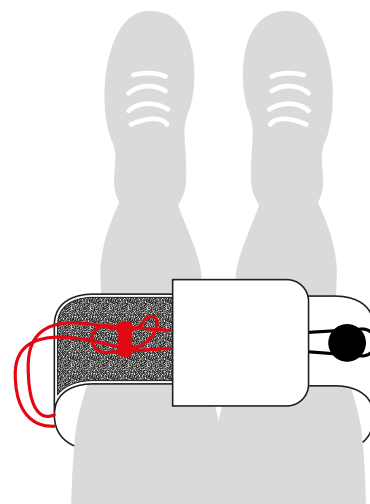


5. Připravíme si tašku a pás pro následné provlečení.

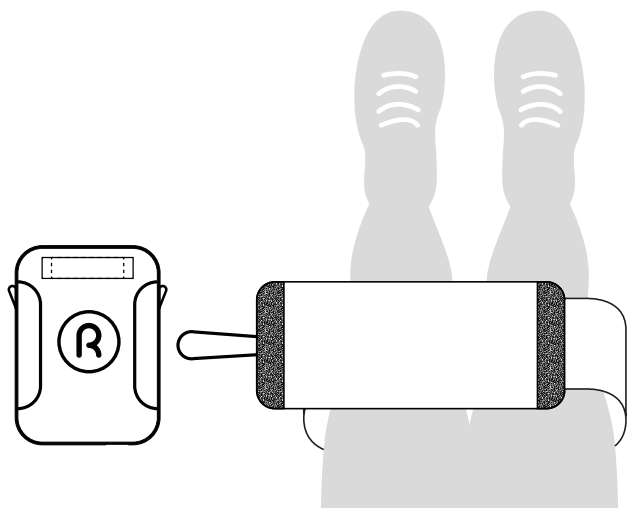

6. Tašku provlečeme vyčnívajícím pásem logem k sobě.

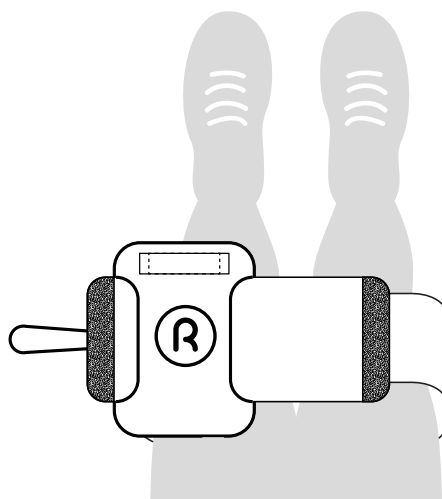

7. Tašku s pásem otočíme a spojíme suchým zipem, oknem na telefon k sobě.

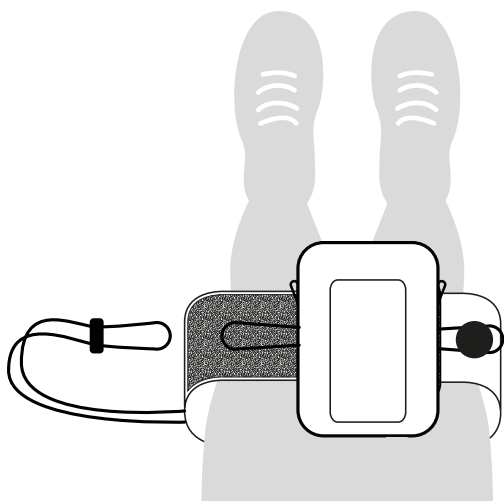

8. Na pravé straně zahákneme gumičku za knoflík.

